

UZAVŘENÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM

Montážní návod:

1. Připojte otočný konektor k endotracheální nebo tracheostomické kanyle.
2. Druhý konec otočného konektoru napojte na ventilační okruh.
3. Nalepte štítek s označením dne výměny na přerušovač sání.
4. Sejměte krytku přerušovače sání a koncovku propojte na zdroj aktivního sání.

Upozornění:

1. Doba použití je 72 hodin.
2. Jednorázová pomůcka, po použití znova nesterilizujte.
3. Při každé výměně nalepte nový štítek s označením dne výměny.
4. V případě poškození ihned vyměňte.

Návod na použití:

1. Kontrolní odsávací ventil otočte do polohy ON, odsávací katétr zaveďte do endotracheální trubice do potřebné hloubky.
2. Stlačte odsávací ventil, kterým spustíte sání a zatáhněte odsávacím katétrem zpět za aktivního sání.
3. V případě potřeby aplikujte horním proplachovacím portem (pro bronchiální laváž) fyziologický roztok ke snadnějšímu odstranění sekretu z dýchacích cest.
4. Po ukončení odsávání povytáhněte odsávací katétr nad úroveň zámku a zámek uzavřete.
5. Čištění odsávacího katétru pro jeho další použití proveďte pomocí dolního proplachovacího portu, kterým za trvalého sání aplikujte fyziologický roztok. Uzavřete odsávací ventil otočením do polohy OFF.